

Kompresivní krytí TipStop®

Okamžitě zastavuje krvácení.

Pomocí lehkého stlačení



 **GAMBRO®**

Kompresivní krytí TipStop®: Okamžitě zastavuje krvácení

Kompresivní krytí TipStop bylo speciálně vyvinuto k zastavení krvácení po cévních punkcích a k zajištění dlouhodobé ochrany píštěle.

Současně je však nutná rychlost a přesnost při zastavení krvácení na jednotkách intenzivní péče a pohotovostí. Krvácení je nutné zastavit okamžitě... bleskově!

Díky svému unikátnímu provedení nabízí kompresivní krytí TipStop skutečně praktické výhody ve smyslu účinnosti a komfortu jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál.

Hemostáze v extrémních situacích

U pacientů užívajících antikoagulantia nebo u pacientů s poruchami krevního srážení je nutné krvácení zastavit okamžitě. Jemný stejnoměrný tlak na místo punkce umožňuje rychlejší hojení rány.

Rozmanité použití

Aplikujte po punkci dialyzačního shuntu nebo při jakékoli jiné venepunkci. Budete překvapeni, jak účinně lze krvácení zastavit.

Podpora srážení krve

Alginát extrahovaný z hnědých řas se při styku s tekutinou přetváří na gel, což podporuje vlastní srážení v těle a díky tomu dochází k menšímu sekundárnímu krvácení a rychlému zahojení.

Šetrné k pokožce

Hypoalergenní křídélka jsou šetrná k pokožce a snadno se odlepují jak u pacientů léčených kortisonem, tak u pacientů s velmi suchou pokožkou.

Jednoduché použití

Bez nutnosti složité přípravy stěrů nebo krytí. K dosažení okamžité hemostáze stačí jen otevřít rozlepit a aplikovat.

* Dodržujte standardní pokyny pro péči o ránu.



Použití kompresivního krytí TipStop®

Vyjměte ze sterilního balení a odlepte ochranný film.



Uchopte mezi palec a prostředníček, ukazováčkem podepřete zadní část.



Stiskněte kompresivní část místa punkce ukazováčkem.




Upevněte pomocí samolepicích křídélek. Krytí je aplikováno správně, pokud se neobjeví žádné vnější známky krvácení.



Poznámka

Kompresivní krytí TipStop se dodává ve sterilním balení. Zkontrolujte, zda balení není poškozené nebo otevřené. Určeno k jednorázovému použití za aseptických podmínek. Není určeno k dlouhodobému použití a krytí je nutné odstranit nejpozději za 4 hodiny po aplikaci.

Informace pro objednávání

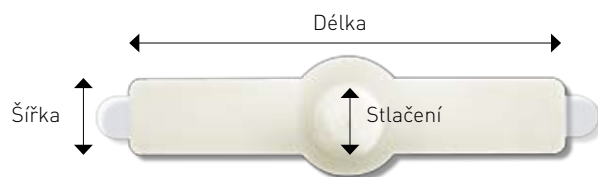

Kompresivní krytí TipStop®

Název produktu	Kód produktu	Délka	Šířka	Stlačení	Počet jednotek v balení
TipStop	101997	100 mm	28 mm	18 mm	96

Gambro® je ochrannou známkou společnosti Gambro Lundia AB.
TipStop® je ochranná známka společnosti Gambro Hospal (Switzerland) Ltd. registrovaná v USA, Francii a v dalších zemích.

Gambro AB
Regeringsgatan 29
PO Box 7373
SE-103 91 Stockholm
Sweden
Tel +46 8-613 65 00
Fax +46 8-611 28 30
www.gambro.com

 **GAMBRO®**